

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Ab sofort wird die Bestimmung von okkultem Blut im Stuhl in unserem Labor mittels eines immunologischen Tests (FOB) durchgeführt. Im Gegensatz zum Guajak-Test (Haemocult) weist der immunologische Test eine wesentlich höhere Spezifität und Sensitivität auf. Die Stuhlentnahme erfolgt durch den Patienten mittels SENTiFIT pierceTube.



Die Probengewinnung mittels SENTiFIT pierceTube ist einfach durchführbar und die von uns bereit gestellte Anleitung ist bebildert sowie leicht verständlich und kann dem Patienten als Handout mitgegeben werden. Die Anleitung ist auf www.medilab.at/news als Download verfügbar.

Die Stabilität des Hämoglobins im Röhrchen beträgt 14 Tage bei 2-8°C bzw. 7 Tage bei 15-30°C. Pro Patient kann nur 1 Probe/Auftrag verrechnet werden, statt wie bisher 3 Proben. Als zuweisende Ordination können Sie die Tubes kostenlos bei der Fa. Labatech bestellen (Art.Nr. 1156188). Die Testdurchführung erfolgt bei uns im Labor.

Ergebnisinterpretation:

- NEGATIV (15 ng/ml): Wert unterhalb der Quantifizierungsgrenze von 15 ng/ml.
- KONTROLLBEREICH (> 15 ng/ml bis ≤ 100 ng/ml): Kontrolluntersuchung zum Ausschluss einer Blutung im Gastrointestinaltrakt empfohlen.
- POSITIV (> 100 ng/ml): Verdacht auf Blutung im Gastrointestinaltrakt. Weitere Abklärung empfohlen.

Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen, ihr Fachärzteteam

Dr. Hans Georg Mustafa

Dr. Dorothea Neumann-Richter

Dr. Maria Elisabeth Mustafa-Korninger

Doz. Dr. Markus Hell